

VITAVM®13

Для полной облицовки металлических каркасов с обычным КТР



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 11.11

VITA shade, VITA made.

VITA

Описание продукта

VITA VM 13 была создана как облицовочная керамика из полевого шлата для сплавов с обычным КТР в пределах ок. 13,8 –15,2. Диапазон КТР и температура обжига VITA VM 13 оптимально подходят для сплавов с высоким содержанием золота, с низким содержанием золота, сплавов на базе

палладия, а также для сплавов неблагородных металлов. Деформация сплава при температурах обжига VITA VM 13 полностью исключается.

VITA VM 13 предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4.

VITAVM.13 Наборы - цвета VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Преимущества

- Отличная связка
- Оптимальные свойства при обработке как, например, превосходная прочность, минимальная усадка и высокая стабильность кромок
- Первоклассная стабильность при обжиге, в т.ч. при многочисленных
- Замечательно шлифуется и полируется, особенно in situ
- Керамика из полевого шпата мелкодисперсной структуры



- Гомогенные и плотные поверхности
- все хим.-физ. характеристики вкл. абразию аналогично естественной эмали
- Выверенный ассортимент дополнительных масс для индивидуализации
- Светопреломление и отражение света аналогично естественной эмали
- Предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4

VITA VM 13 BASIC KIT POWDER 3D-MASTER

Базовый набор для послойной техники BASIC

Кат.номер BV13BK12V1**

Количество	Содержание	Материал
1	12 г	WASH OPAQUE
3	12 г	SUN OPAQUE SO1-SO3
5	12 г	OPAQUE OP1-OP5
26	12 г	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 г	SUN DENTINE SD1-SD3
5	12 г	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	12 г	NEUTRAL NT
1	12 г	WINDOW WIN
3	12 г	CORRECTIVE COR1-COR3
1	шт.	VITA MODISOL карандаш
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 мл	VITA VM OPAQUE FLUID
1	упак	Обжиговые подставки G
1	упак	Обжиговый трегер A+B+C
1	шт.	Цветовой индикатор
1	шт.	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Рабочая инструкция

* предлагается в следующих цветах также как набор BASIC KIT SMALL (кат.номер BV13BKS12V1): 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, WO, OP1-OP4, CP1-CP5, ENL, END, NT, WIN, COR1, SD1-SD3, SO1-SO3

** предлагается также с пастоопакером PASTE OPAQUE (кат.номер BV13BK12PV1; BV13BKS12PV1)



VITA VM 13 BUILD UP KIT 3D-MASTER

Расширенный ассортимент для послойной техники BUILD UP

Кат.номер BV13BUK12*

Количество	Содержание	Материал
26	12 г	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID

* предлагается в следующих цветах также как набор BUILD UP KIT SMALL (кат.номер BV13BUKS12): 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3



VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT POWDER 3D-MASTER*

Ультра светлые цвета для воспроизведения отбеленных зубов

Кат.номер BV13BLK

Количество	Содержание	Материал
1	12 г	OPAQUE OPO
3	12 г	BASE DENTINE 0M1-0M3
3	12 г	TRANSPA DENTINE 0M1-0M3
1	12 г	ENAMEL ENL
1	12 г	NEUTRAL NT
1	12 г	WINDOW WIN
1	50 мл	OPAQUE FLUID
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID
1	шт.	BLEACHED SHADE GUIDE Shade Group OM
		Рабочая инструкция

* предлагается также с пастоопакером PASTE OPAQUE (кат.номер BV13BLKP)



VITA VM 13 BASIC KIT POWDER classical

Базовый набор для послойной техники BASIC

Кат.номер BV13BK12CV1**

Количество	Содержание	Материал
1	12 г	WASH OPAQUE WO
16	12 г	OPAQUE A1-D4
16	12 г	BASE DENTINE A1-D4
3	12 г	SUN DENTINE SD1-SD3
5	12 г	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	12 г	NEUTRAL NT
1	12 г	WINDOW WIN
3	12 г	CORRECTIVE COR1-COR3
1	шт.	VITA MODISOL карандаш
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID
1	упак	Обжиговые подставки G
1	упак	Обжиговый трегер A+B+C
1	шт.	Цветовой индикатор
1	шт.	VITA цветовая шкала
		Рабочая инструкция

* предлагается в следующих цветах также как набор BASIC KIT SMALL classical (кат.номер BV13BKS12CV1): A1, A2, A3, A3.5, B3, D3, CP1-CP5, ENL, END, NT, WIN, COR1, SD1-SD3

** предлагается также с пастоопакером PASTE OPAQUE (кат.номер BV13BK12PCV1 / BV13BKS12PCV1)



VITA VM 13 BUILD UP KIT classical

Расширенный набор для послойной техники BUILD UP

Кат.номер BV13BUK12C*

Количество	Содержание	Материал
16	12 г	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID

* Предлагается в следующих 6 цветах также как набор BUILD UP KIT SMALL classical (кат.номер BV13BUKS12C): A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT POWDER**

Расширенный набор для пользователей VITA VM 13 3D-MASTER*

Кат.номер BV13CCK12

Количество	Содержание	Материал
16	12 г	OPAQUE A1-D4
16	12 г	BASE DENTINE A1-D4
16	12 г	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 мл	VITA VM OPAQUE FLUID
1	50 мл	VITA VM MODELLING LIQUID
1	шт.	Цветовой индикатор
1	шт.	VITA цветовая шкала
		Рабочая инструкция

* Набор для пользователей VITA VM 13 3D-MASTER, которые хотят расширить свой ассортимент массами VITA classical

** Предлагается также с пастоопакером PASTE OPAQUE (кат.номер BV13CCK12P).



VITA VM 13 PROFESSIONAL KIT

Для создания естественных эффектов

Кат.номер BV13PKV1*

Количество	Содержание	Материал
11	12 г	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 г	MAMELON MM1-MM3
3	12 г	EFFECT PEARL EP1-EP3
5	12 г	EFFECT OPAL EO1-EO5
11	12 г	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 г	EFFECT LINER EL1-EL6
по 1	шт.	Планки с цветовыми образцами EFFECT ENAMEL, EFFECT OPAL, EFFECT CHROMA, EFFECT LINER

* Предлагается также в следующих 15 цветах как набор PROFESSIONAL KIT SMALL (BV13PKS): EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11

VITA VM 13 GINGIVA KIT POWDER*/**

Десневые массы натурального цвета

Кат.номер BV13GK

Количество	Содержание	Материал
5	12 г	GINGIVA G1-G5
2	12 г	GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1	шт.	Цветовые эталоны GINGIVA

* Предлагается также с пастоопакером (кат.номер BV13GKP)


VITA VM 13 MARGIN KIT**

Для создания керамического плеча

Кат.номер BV13MK

Количество	Содержание	Материал
6	12 г	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	шт.	Цветовые эталоны MARGIN

** VITA VM 13 GINGIVA KIT и VITA VM 13 MARGIN KIT поставляются в упаковке DIN A4.

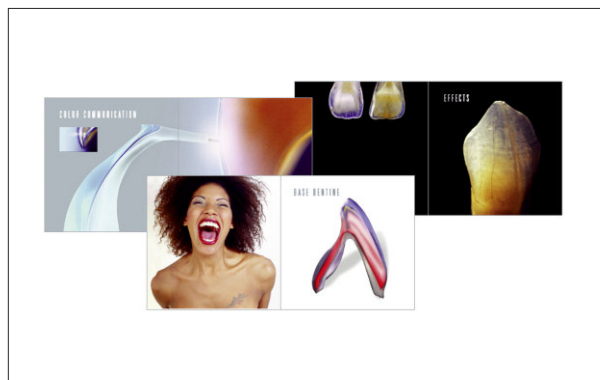

Печатные и мультимедийные издания

Название	Оглавление	Кат.номер
VITA VM 13	Рабочая инструкция	1180
VITA VM 13	Формуляры заказа 3D-MASTER	1205*
VITA VM 13	Формуляры заказа classical	1542M*
VITA VM 13	Проспект	1229
VITA VM 13	Листовка	1561
VITA VM	Проспект о концепции	1218
VITA VM	Фотоальбом (100 страниц)	W008
МОТИВАЦИЯ		(платный)
VITA VM DVD	Видеоролики с практическими советами	1447M

* для загрузки см. www.vita-zahnfabrik.com

VITAVM.13 Классификационные таблицы VITA SYSTEM 3D-MASTER® и VITA classical A1–D4

Соотносительные данные являются лишь ориентировочными!

Цвета VITA SYSTEM 3D-MASTER	OPAQUE	MARGIN	EFFECT LINER	CHROMA PLUS	ENAMEL
0M1	OP0	M1	EL1	–	ENL
0M2	OP0	M1	EL1	–	ENL
0M3	OP0	M1	EL1/EL2*	–	ENL
1M1	OP1	M1/M7*	EL1/EL2*	CP1	ENL
1M2	OP1	M1/M7*	EL2	CP1/CP2*	ENL
2L1.5	OP2	M1/M7*	EL1/EL2*	CP1/CP2*	ENL
2L2.5	OP2	M1/M4*	EL1/EL3*	CP2/CP3*	ENL
2M1	OP2	M1/M7*	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
2M2	OP2	M1/M4*	EL1/EL3*	CP1/CP3*	ENL
2M3	OP2	M4	EL2/EL4*	CP3	ENL
2R1.5	OP2	M1/M7*	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
2R2.5	OP2	M1/M4*	EL2/EL4*	CP1/CP3*	ENL
3L1.5	OP3	M4/M7*	EL2/EL6*	CP2/CP5*	ENL
3L2.5	OP3	M4/M7*	EL4/EL6*	CP2/CP5*	ENL
3M1	OP3	M7	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
3M2	OP3	M4/M7*	EL2/EL6*	CP3/CP5*	ENL
3M3	OP3	M4/M9*	EL4/EL6*	CP4/CP5*	ENL
3R1.5	OP3	M7	EL2/EL3*	CP1/CP5*	ENL
3R2.5	OP3	M4/M7*	EL5/EL6*	CP4/CP5*	ENL
4L1.5	OP4	M7	EL6	CP5	END
4L2.5	OP4	M4/M9*	EL3/EL4*	CP4/CP5*	END
4M1	OP4	M7	EL6	CP5	END
4M2	OP4	M7/M9*	EL2/EL3*	CP3/CP5*	END
4M3	OP4	M9	EL5/EL6*	CP4/CP5*	END
4R1.5	OP4	M7/M8*	EL2/EL3*	CP5	END
4R2.5	OP4	M7/M9*	EL3/EL4*	CP4/CP5*	END
5M1	OP5	M7/M8*	EL3/EL6*	–	END
5M2	OP5	M7/M9*	EL5/EL6*	–	END
5M3	OP5	M5/M9*	EL3/EL4*	–	END







Цвета VITA classical A1 - D4	OPAQUE	MARGIN	EFFECT LINER	CHROMA PLUS	ENAMEL
A1	A1	M1/M7*	EL2	CP1	ENL
A2	A2	M4/M7*	EL1/EL3*	CP2	ENL
A3	A3	M4	EL4/EL6*	CP2/CP3*	ENL
A3,5	A3,5	M4/M9*	EL5/EL6*	CP2/CP3*	END
A4	A4	M4/M9*	EL1/EL3*	CP2/CP4*	END
B1	B1	M1/M4*	EL1/EL2*	CP1	END
B2	B2	M1/M4*	EL1/EL4*	CP1	END
B3	B3	M4	EL2/EL4*	CP2/CP3*	END
B4	B4	M4/M9*	EL4/EL6*	CP3	END
C1	C1	M1/M4*	EL1/EL6*	CP1	END
C2	C2	M4/M7*	EL2/EL6*	CP1/CP5*	END
C3	C3	M4/M7*	EL6	CP1/CP5*	ENL
C4	C4	M4/M7*	EL3/EL6*	CP5	ENL
D2	D2	M1/M9*	EL2/EL6*	CP1/CP5*	END
D3	D3	M4/M7*	EL2/EL3*	CP2/CP5*	END
D4	D4	M1/M4*	EL2/EL6*	CP2/CP5*	END

* Соотношение смешивания 1 : 1

VITAVM®13 Дополнительные массы для VITA SYSTEM 3D-MASTER® и VITA classical A1–D4

Наименование	Описание	Кат.номер 12 г
--------------	----------	----------------




VITAVM®13 EFFECT LINER

	EL1	белый	B4514112
	EL2	бежевый	B4514212
	EL3	коричневый	B4514312
	EL4	желтый	B4514412
	EL5	оранжевый	B4514512
	EL6	желто-зеленый	B4514612





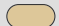


VITAVM®13 EFFECT CHROMA

	EC1	белый	B4512112
	EC2	песочно-бежевый	B4512212
	EC3	светло-желтый	B4512312
	EC4	нежный желто-лимонный	B4512412
	EC5	светло-оранжевый	B4512512
	EC6	оранжевый	B4512612
	EC7	розовый	B4512712
	EC8	бежево-коричневый	B4512812
	EC9	коричневый	B4512912
	EC10	коричнево-зеленый	B4513012
	EC11	серо-зеленый	B4513112



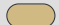
VITAVM®13 MAMELON

	MM1	бежевый	B4516112
	MM2	теплый желто-коричневый	B4516212
	MM3	нежный оранжевый	B4516312




VITAVM®13 GINGIVA

	G1	старо-розовый	B4523112
	G2	оранжево-розовый	B4523212
	G3	розовый	B4523312
	G4	красно-коричневый	B4523412
	G5	черно-красный	B4523512
	GOL	светло-розовый	B4517112
	GOD	темно-розовый	B4517312

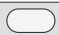VITAVM®13 CORRECTIVE










	COR1	нейтральный	B4522112
	COR2	бежевый	B4522212
	COR3	коричневый	B4522312

VITAVM®13 SUN DENTINE


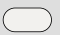

	SD1	светло-желтый	B4536112
	SD2	светло-оранжевый	B4536212
	SD3	оранжево-красный	B4536312

Наименование	Описание	Кат.номер 12 г
--------------	----------	----------------






VITAVM®13 EFFECT ENAMEL

	EE1	беловато транслюцентный	B4509112
	EE2	пастельный	B4509212
	EE3	розовый транслюцентный	B4509312
	EE4	желтоватый	B4509412
	EE5	желтовато транслюцентный	B4509512
	EE6	красновато транслюцентный	B4509612
	EE7	оранжевый транслюцентный	B4509712
	EE8	красный транслюцентный	B4509812
	EE9	голубовато транслюцентный	B4509912
	EE10	голубой	B4510012
	EE11	серовато транслюцентный	B4510112




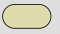
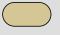

VITAVM®13 EFFECT PEARL

	EP1	нюанс пастельно-желтого	B4515112
	EP2	нюанс пастельно-оранжевого	B4515212
	EP3	нюанс пастельно-розового	B4515312

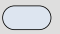




VITAVM®13 EFFECT OPAL

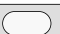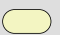	E01	нейтральный универсальный	B4517112
	E02	беловатый	B4517212
	E03	голубоватый	B4517312
	E04	голубой	B4517412
	E05	темно-фиолетовый	B4517512

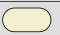


VITAVM®13 MARGIN

	M1	белый	B4526112
	M4	желтый	B4526412
	M5	янтарный	B4526512
	M7	светло-бежевый	B4526712
	M8	пастельно-коричневый	B4526812
	M9	светло-оранжевый	B4526912

VITAVM®13 CHROMA PLUS

	CP1	цвет слоновой кости	B4524112
	CP2	бежевый	B4524212
	CP3	светлый оранжево-коричневый	B4524312
	CP4	оранжевый	B4524412
	CP5	оранжево-зеленый	B4524512

VITAVM®13 SUN OPAQUE

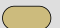	S01	желтоватый	B4529112
	S02	оранжевый	B4529212
	S03	красноватый	B4529312

VITA